

ait
aukey home
NAIPO BM-X1



návod k použití
diagnostická váha nové koncepce

TECHNICKÉ ÚDAJE

Máte-li dotazy týkající se nového výrobku, neváhejte se na nás obrátit e-mailem na adresu help@aukeyhome.com. Doufáme, že budete s vaším novým výrobkem spokojeni!


Název výrobku	diagnostická váha NAIPO BM-X1
Rozměry výrobku	300 × 275 × 25 mm
LCD displej	108 × 62 mm
Zdroj napájení	4 × baterie typu AAA (6,0 V)
Jednotky měření hmotnosti	kg/lb
Váhový rozsah	8 – 180 kg
Počet účtů	bez omezení (každý účet může přidat 24 osob)
Režim dítě	umožňuje vážit mladší děti
Záznam výšky	umožňuje zaznamenávat výšku osob do věku 16 let
Provozní teplota	5 °C – 35 °C
Provozní vlhkost	relativní vlhkost 40% ~ 80%
Podporovaná zařízení	iOS 8.0 a vyšší, Android 6.0 a vyšší

OBSAH BALENÍ

1. diagnostická váha




2. baterie typu AAA

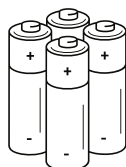

3. návod k použití



SEZNÁMENÍ S DIAGNOSTICKOU VÁHOU

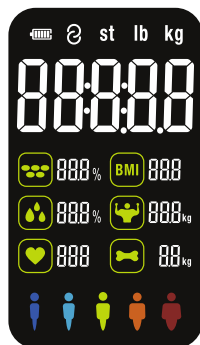

Zaznamenávané parametry

hmotnost	BMI	obsah tuku v těle	vnitřní tuk
voda v těle	obsah svaloviny	hmotnost svaloviny	hmotnost kostí
bílkoviny	BMR	tělesný věk	záznam výšky (mladší 16 let)
hmotnost bez tuku	srdeční index	tělesná kondice	

Symbyly na displeji

Lo	Slabé baterie – vyměňte prosím baterie (4 x baterie typu AAA, 6,0 V).
Err	přetíženi
C	Došlo k chybě v průběhu měření. Sestupte z váhy a stoupněte si na ni znovu, aby se mohlo celé měření zopakovat.

Instalace aplikace Fitdays



1. V obchodech Apple Store nebo Google Play vyhledejte „Fitdays“ nebo sejměte svým zařízením QR kód vlevo.
2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci na své zařízení.
3. Jámile bude instalace dokončena, objeví se na telefonu nebo tabletu ikona aplikace.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Důležité: Přečtete si pečlivě pokyny v tomto návodu dříve, než budete zařízení používat. Jestliže pokyny uvedené v tomto návodu nedodržíte nebo použijete-li váhu jiným způsobem, než jaký byl v tomto návodu uveden, může dojít ke zranění nebo k poškození váhy.

- NEPOUŽÍVEJTE současně se zdravotními implantáty, jako jsou například kardiostimulátory.
- NESTOUPEJTE na okraj váhy a neseskakujte z ní.
- NEPŘETĚŽUJTE váhu (nejvyšší povolená zátěž je 180 kg).
- NEPOUŠTĚJTE váhu na zem a nenechte na ni padat jiné předměty, aby nedošlo k poškození senzorů přístroje.
- NEPONORUJTE váhu do vody a nepoužívejte k jejímu čištění chemické prostředky. Váhu čistěte mírně vlhkým hadrem.
- NEDOPORUČUJE se používat váhu těhotnými ženami.
- NEDOPORUČUJE se používat váhu kojenci, batolaty a dětmi mladšími 16 let.
- Každá měření zaznamenaná tímto zařízením jsou POUZE orientační a neměla by být považována za lékařský posudek.
- Než upravíte svoji stravu, tréninkový plán nebo fyzickou aktivitu, poradte se nejprve se svým ošetřujícím lékařem.
- VŽDY před měřením umísťujte váhu na pevný, suchý a rovný povrch.
- Ujistěte se, že máte suchá chodidla, než na váhu vstoupíte.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou tak, jak je vyznačena.

Nebude-li váha delší dobu používána, vyjměte z ní baterie.

POUŽÍVÁNÍ APLIKACE Fitdays

1. Vložte 4 baterie typu AAA, které jsou přiloženy v balení, do prostoru pro baterie v zadní části váhy. Postavte váhu na pevný, rovný povrch.




2. Na svém chytrém telefonu nebo tabletu otevřete aplikaci Fitdays a povolte Bluetooth.
3. Proveďte registraci svého identifikátoru (ID) prostřednictvím e-mailové adresy nebo účtu na sociální síti.

POZNÁMKA

Zadáte-li chybné pohlaví, věk, výšku nebo tělesnou úroveň, mohou být výsledky měření nepřesné.

4. Spárujte váhu prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Automatické párování: klepněte na Mine (moje) → Device (zařízení) → Bluetooth, vyhledejte párované zařízení a nyní je váš telefon spojen s váhou.

Poznámka: Párování svého zařízení s váhou přes Bluetooth provádějte při zapnuté váze.

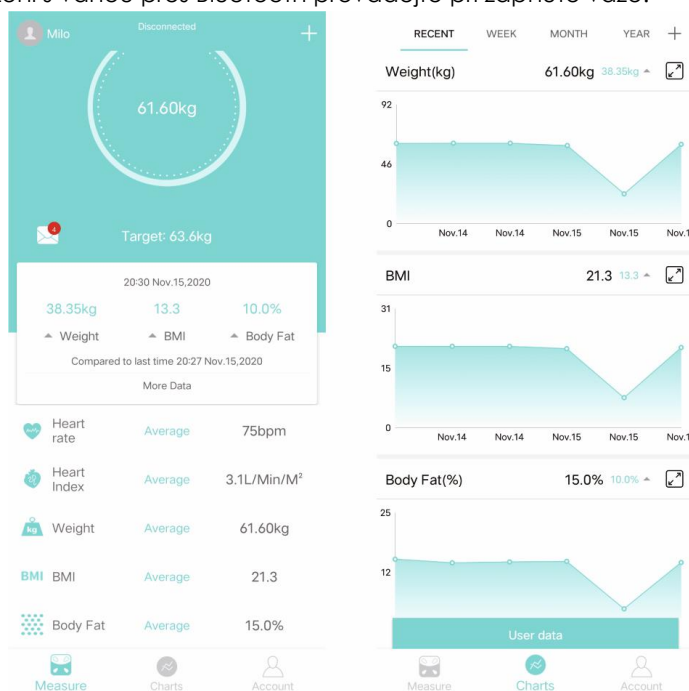

5. Šlápnutím nohou na váhu zapnete displej.




6. Stoupněte si na váhu BOSÝMA nohama, aby mohlo proběhnout měření údajů o tělesném tuku.




POZNÁMKA

Stoupnete-li na váhu nohama v ponožkách, proběhne měření pouze hmotnosti a BMI a pouze tyto údaje se zobrazí na hlavní stránce. Chcete-li informace úplné, stoupněte si na váhu bosýma nohama. Než budete měřit hmotnost, otevřete aplikaci Fitdays a ponechte ji v hlavním rozhraní.


7. Číslo na displeji bliká, zatímco váha provádí měření hmotnosti a analyzuje údaje. Po zahájení měření displej váhy zobrazuje hmotnost a po třech bliknutích se uzamkne. Poté se váha přepne do režimu měření tuku. V tomto okamžiku bude na displeji blikat ikona srdce a tělesného tuku. Po změření tělesného tuku bude ikona srdečního rytmu blikat dále a informovat, že stále probíhá měření srdečního rytmu. Setrvejte na váze, dokud se nezobrazí veškeré údaje. Teprve pak budou veškerá měření dokončena a data synchronizována s aplikací Fitdays. Po zobrazení všech dat po dobu 10 sekund se displej automaticky vypne.

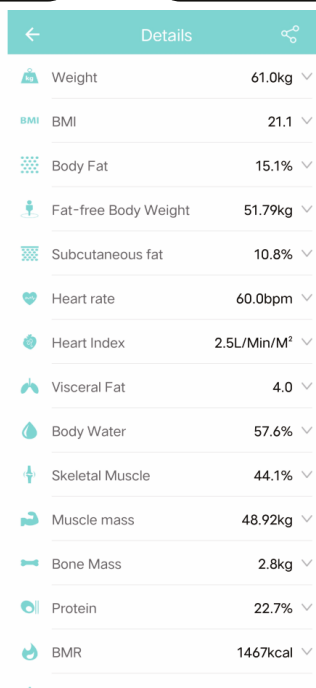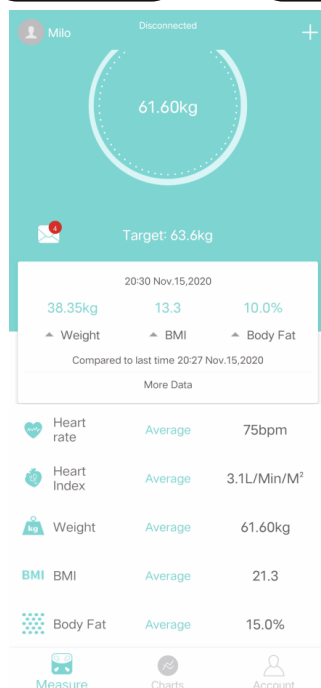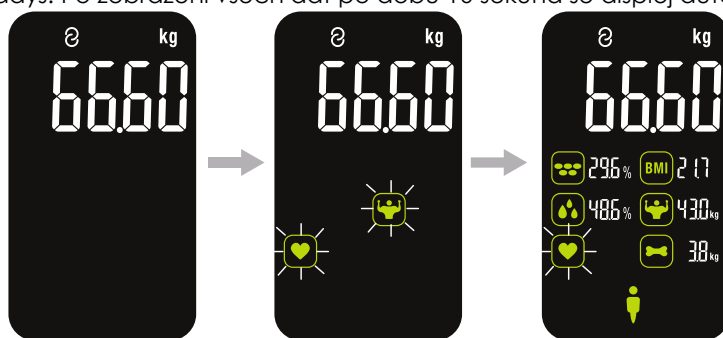


8. Můžete si prohlédnout analýzu naměřených parametrů tělesné hmotnosti, BMI, BFR, svalové hmoty, hmoty kostí atd. (viz podrobnosti v kapitole ZAZNAMENÁVANÉ PARAMETRY). Klepnete-li na Record (zaznamenat), uvidíte graf vývoje parametrů v delším časovém intervalu.

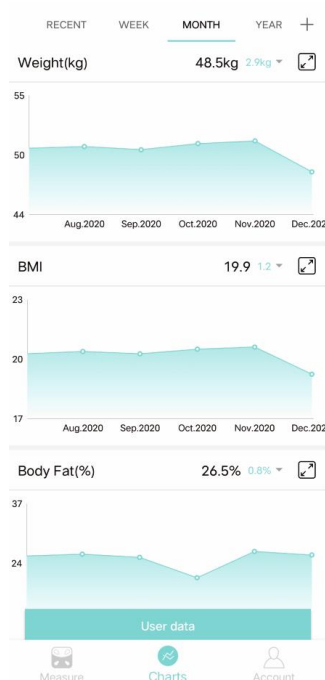

9. Přidejte nebo přepněte uživatele klepnutím na Me (já) → Manage Users (spravovat uživatele) a zadejte své osobní údaje. Chytrá váha dokáže rozeznat, který uživatel na ní stojí, a uživatele si zapamatovat, aby automaticky přepnula na správná data. Každý účet může obsahovat údaje až 24 uživatelů.

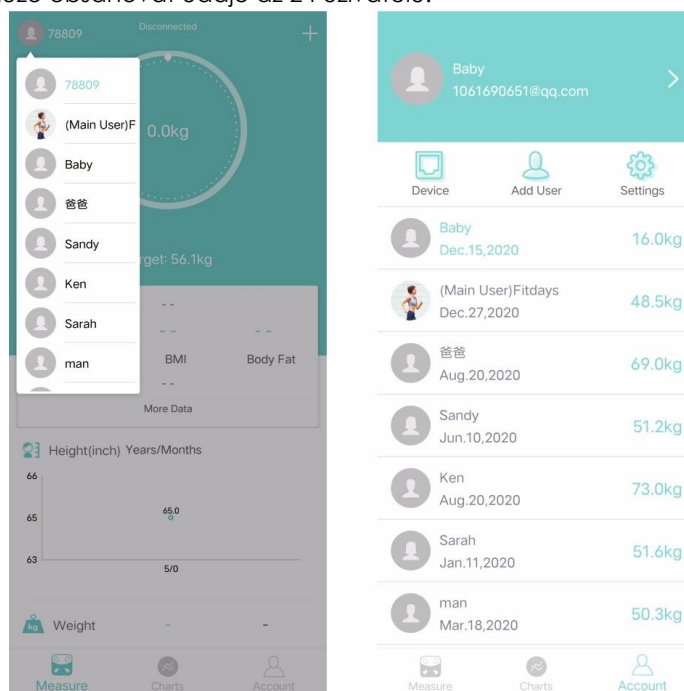

10. Vážení mladšího dítěte: klepněte na + → Baby Mode (režim mladšího dítěte). Sami si stoupněte na váhu. Jakmile váha určí vaši hmotnost, podržte dítě, abyste jej zvažili.

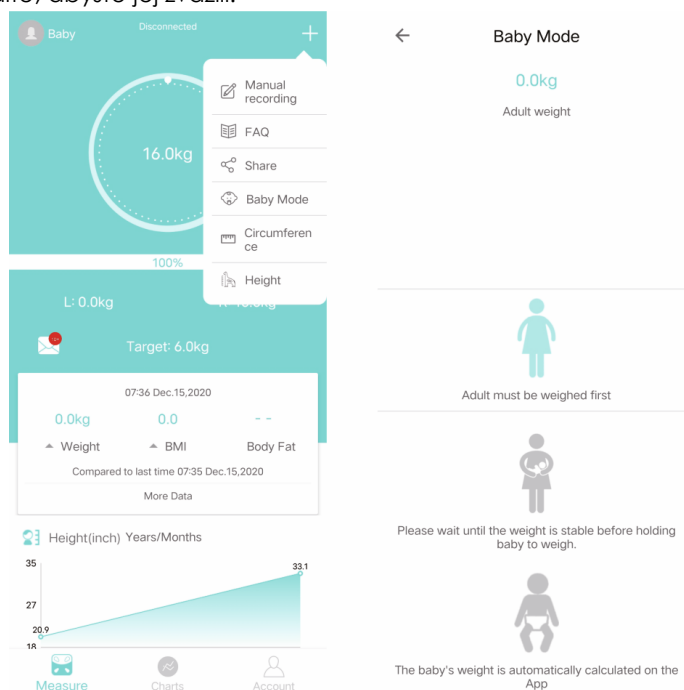





PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

1. Vložte 4 baterie typu AAA, které jsou přiloženy v balení, do prostoru pro baterie v zadní části váhy. Postavte váhu na pevný, rovný povrch.

Problém	Snadné řešení
Nedošlo k připojení přes Bluetooth	<ol style="list-style-type: none">1. Váha i chytrý telefon musí mít zapnuté rozhraní Bluetooth a zařízení musí být povolena.2. Zkontrolujte verzi operačního systému svého chytrého telefonu; verze iOS musí být 8.0 a vyšší / verze Android musí být 6.0 a vyšší.3. Klepněte na Me (já) > My device (mé zařízení) a najděte identifikátor váhy.
Při vážení nejsou zaznamenány údaje o tělesném tuku	<ol style="list-style-type: none">1. Aby mohl být změřen tělesný tuk, musí uživatel stát na váze bosýma nohama.2. Ověřte si, že máte suchá chodidla a že je suchá váha.3. Váha zatím nemá dokončená měření, dokud čísla na displeji blikají (zůstaňte na váze stát zhruba 10 sekund, dokud čísla nepřestanou blikat).4. Bluetooth není zapnuté.5. Bluetooth je spárované s jinou váhou.
Váha uvádí kolísavé údaje	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda je váha postavena na tvrdém a rovném povrchu.2. Zkontrolujte podnožky senzorů vzadu na váze, zda nic neblokuje jejich pohyb.3. Vyjměte baterie a váhu restartujte.
Aplikace zobrazuje nesprávný poměr tuku/svaloviny	Nejsou správně zadány tělesné parametry. Zkontrolujte, zda jste zadali správně své pohlaví, výšku a věk.
Jak provést kalibraci váhy po jejím přemístění nebo po výměně baterií?	Stoupnutím na váhu ji zapněte. Nechte ji automaticky odečíst hmotnost 0,0 kg, aby došlo k její kalibraci.
Váha se nezapíná	Vyjměte baterie a vložte je zpět. Přesvědčte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou.
Jak změnit jednotku hmotnosti?	Když je váha připojena k aplikaci, přejděte do nastavení a zvolte jednotku kg nebo lb.

INFORMACE O BATERIÍCH

-  * Nemá-li být váha delší dobu používána, doporučujeme vyjmout baterie a předejít tak poškození váhy, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie „vytekly“.
- * Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
-  * Nemíchejte staré baterie s novými a baterie různých výrobců. Předejete tím možnému „vytečení“ baterií, případně jejich výbuchu.
- * Nezahřívajte a neničte baterie, hrozí nebezpečí požáru.
- * Prázdné baterie se nesmí odhazovat do běžného domovního odpadu.
-  * Zjistěte si, jaká pravidla v místě vašeho bydliště platí pro recyklaci baterií.
- * Vysloužilé elektrické výrobky se nesmí odhazovat do běžného domovního odpadu.
-  Zajistěte prosím recyklaci tam, kde je to možné. Zjistěte, jak funguje recyklace v místě bydliště nebo požádejte o radu prodejce přístroje.

Likvidace

Obalový materiál lze recyklovat. Zlikvidujte obal způsobem vhodným pro životní prostředí a předejte jej do recyklačního střediska.

Likvidaci přístroje proveďte způsobem vhodným pro životní prostředí. Odnešte jej do recyklačního střediska určeného pro vysloužilé elektrospotřebiče.

Podrobnější informace získáte od úřadů v místě svého bydliště.

Před likvidací přístroje je nezbytné vyjmout z něj baterie a jejich likvidaci provést odděleně. Pro ochranu životního prostředí je třeba nenabíjecí a nabíjecí baterie neodhazovat do běžného domovního odpadu, ale odevzdat je na místě k tomu určeném. Je třeba také podotknout, že pro likvidaci baterií mohou platit také další zákonná nařízení.

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz